

1. Sæt strømkablet til tørreboksen og åbn låget

2. Fjern batteri og kabel fra processoren og læg disse og headpiece i tørreboksen

3. Afhængig af fugtigheden på processoren, vælg:

- a. Hvis alm. fugtig. Regelmæssig tørrecyklus (1,5 times tørretid). Tryk en enkelt gang på knappen. Knappen lyser **rødt** når tørreboksen tændes
- b. Hvis meget fugtig. Intensiv tørrecyklus (3 times tørretid). Tryk to gange på knappen. Knappen lyser **blåt**, når tørreboksen tændes.



4. Når tørretiden er afsluttet slukkes lyset. Åben låget og fjern processor, batteri, kabel og headpiece



5. Tørreboksen skal udskiftes hvis lyset blinker skiftevis rødt og blåt, da det betyder at der er en teknisk fejl på boksen.



For yderligere information læs brugervejledning og se instruktionsvideo:
www.youtube.com/watch?v=Kf4RuZEsRSI

