



Fiche pratique : Antenne

ANTENNE UNIVERSELLE (AU)

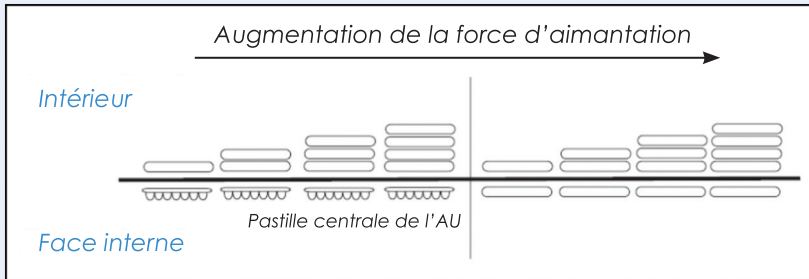


- L'AU peut être utilisée avec tous les processeurs d'Advanced Bionics.
- Si l'aimantation est insuffisante avec 4 aimants internes (ex. peau ou cheveux épais), remplacer la pastille centrale de l'AU par 1 aimant, et augmenter un à la fois le nombre d'aimant interne.
- Si l'aimantation est trop forte avec un aimant, un espaceur de mousse peut être placé en-dessous de l'aimant pour réduire la force d'aimantation.

Pastille centrale de l'antenne universelle

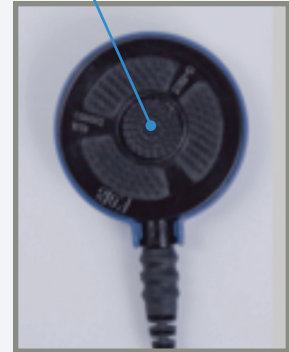

La face interne de l'antenne universelle est noire

ANTENNE AQUAMIC™ (ANTENNE AVEC MICROPHONE ÉTANCHE)

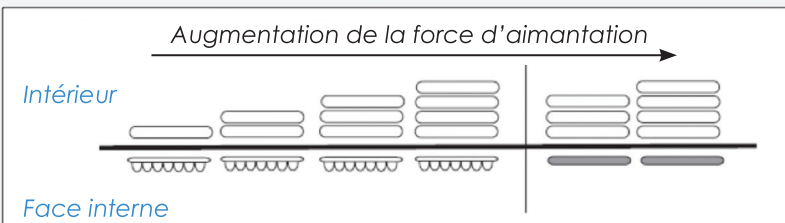

- L'antenne AquaMic peut être utilisée avec le processeur de son Neptune™ et le boîtier AquaCase™ dédié à la série de processeurs de son Naída CI Q.
- Si l'aimantation est insuffisante avec 4 aimants internes, remplacez la pastille centrale de l'AU par 1 AIMANT MINCE (spécialement conçu pour l'antenne AquaMic).







La face interne de l'antenne AquaMic est grise

Important

1. Vérifier régulièrement la zone de l'implant pour éviter toute irritation ou gonflement. Si des signes d'irritation ou de gonflement apparaissent, réduisez la force d'aimantation. Consultez votre médecin si nécessaire.
2. La pastille centrale de l'AU doit être retirée uniquement par un professionnel de l'équipe d'implantation. Si la pastille centrale est décollée ou endommagée, remplacer-la par la pastille centrale additionnelle fournie.

Fiche pratique : Antenne

COMMENT CHANGER L'AIMANT DE L'ANTENNE

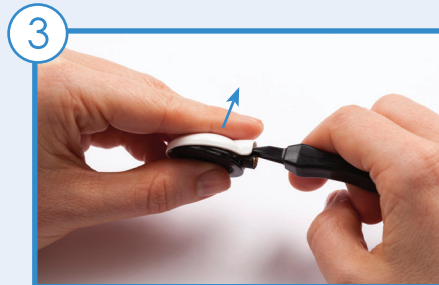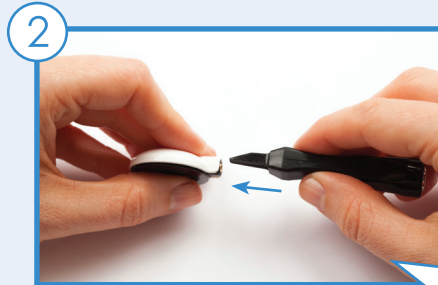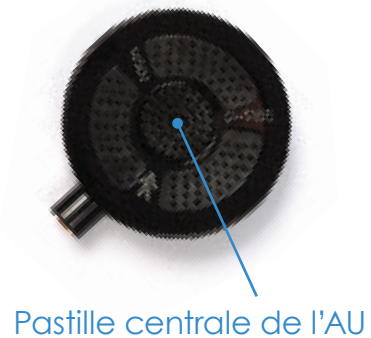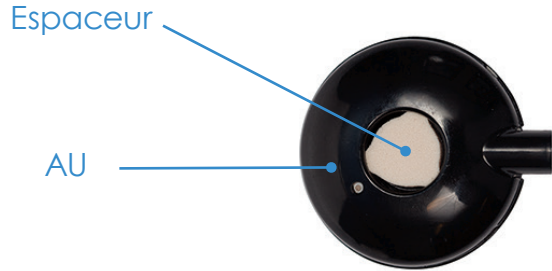

Assurez-vous de placer l'outil de retrait **entre** le cache coloré et la prise de connexion.

Note : l'outil de retrait d'aimant doit seulement être utilisé pour retirer l'aimant externe présent sous le cache coloré, et non pour les aimants internes.

Nettoyage

- Vérifier régulièrement l'aspect de l'antenne. Utiliser un chiffon doux pour nettoyer. N'utiliser pas de solvants.
- L'AquaMic peut être rincée sous l'eau du robinet pour enlever toute poussière ou impureté. Essuyer ou tamponner le microphone avec un tissu doux. Placer le tout dans le système séchant pendant la nuit.