

1- Éléments nécessaires

Boîtier AquaCase (avec joint d'étanchéité).

Antenne AquaMic & son cache coloré AquaMic.

Cordon pour AquaMic.

Clip AquaCase & 1 option de port (*brassard, lanière*).

Batterie mini PowerCel 170.

Programme adapté : votre régleur doit prévoir un programme dédié avec activation du microphone antenne.



2- Entretien

Vérifier que le joint d'étanchéité est correctement placé dans sa loge avant toute utilisation.

Rincer le boîtier AquaCase à l'eau claire après utilisation, surtout après la baignade.

Changer le joint régulièrement (*tous les 3 mois*).

Le joint d'étanchéité doit toujours être souple et doux.


3- Utilisations

Dans tous les environnements humides & poussiéreux.

Activités professionnelles et sportives.

Dans un hammam (*temp. de 40 à 50 °C*).

Ne pas utiliser dans un sauna.

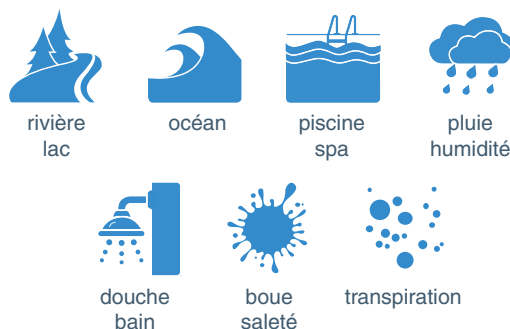

Pour plus d'informations :

Visitez notre site de vente en ligne

www.advanced-bionics.fr

Contactez notre Service Clients

04 72 14 54 60 - info.france@advancedbionics.com